

Nupro Prophylaxe Paste

leštící pasta

NUPRO je leštící pasta s fluorem.

INDIKACE

Leštění povrchu zubu.

SLOŽENÍ

Profylaktická pasta NUPRO obsahuje pemzu (s výjimkou velmi jemné), glycerin, křemelinu (velmi jemná), sodnou sůl sacharinu, vodu, křemičitan sodný, aroma, barvivo, pojivo a konzervační látky. Toto složení určuje pastu k použití na leštění zubů během ošetření ve stomatologické praxi.

Léčivé složky: 2,72 % fluorid sodný (1,23 % fluoridového iontu) (pouze u past obsahujících fluorid)

KONTRAINDIKACE

Pasta NUPRO se nesmí používat u pacientů se známou alergií na jakoukoli její složku.

VAROVÁNÍ

Pasta NUPRO může dráždit oči. Dojde-li ke kontaminaci očí pastou, vyplachujte je okamžitě dostatečným množstvím vody po dobu 15min. Pokud dráždění přetrvává, zajistěte odbornou lékařskou pomoc.

UPOZORNĚNÍ

Pasty NUPRO smí používat pouze lékař nebo proškolený zdravotnický personál. Během používání pasty noste ochranné brýle a rukavice.

NÁVOD K POUŽITÍ

Při používání kelímků si potřebné množství pasty oddělte do vhodné nádoby. V individuálních kalíšcích je dostatečné množství pasty k ošetření jednoho pacienta. Profylaktický kartáček nebo kalíšek naplňte pastou tak, že jej za nízkých otáček vtlačíte do kalíšku s pastou. Používejte vždy dostatečné množství pasty, aby nedocházelo k přehřívání zubu. Polykání pasty a jejímu přílišnému rozpouštění v ústech zabráníte použitím savky.

SKLADOVÁNÍ

Kelímky po použití ihned uzavřete, aby nedocházelo k vysychání pasty. Neskladujte při teplotách vyšších než 25° C. Chraňte před přímým slunečním světlem.

BALENÍ

Velikosti

1. 200 individuálních 2g kalíšků¹
2. 340g kelímek

VÝROBNÍ ČÍSLO A DATUM EXPIRACE

Nepoužívejte po datu expirace. Výrobní číslo je vyznačeno v souladu s požadavky na identifikaci produktu.

¹) kalíšky s jemnou pastou váží 1,9g

Výrobce:
DENTSPLY LLC
Professional Division
1301 Smile Way, York, PA 17404-1785
USA



Datum revize: 3/2018